



Juvéderm[®] HV

HAUTE VISCOSITÉ



LEA Derm

LABORATOIRE D'ESTHETIQUE APPLIQUÉE
EN DERMATOLOGIE

Groupe CORNEAL[®]

Juvéderm® HV

ALTA VISCOSITÀ

I prodotti della gamma Juvéderm® HV beneficiano di tutti i progressi del processo di fabbricazione della linea Juvéderm® classica:

- *l'acido ialuronico ottenuto tramite fermentazione batterica dello *Streptococcus equi* (fonte non patogena per l'uomo), risponde alle esigenze della monografia corrispondente alla Farmacopea europea in vigore e nella quale l'assenza di rischio di ESB, è stata convalidata dalla commissione europea*
- *uso dell'etere butanedioldigliceride (BDDE), quale agente reticolante riconosciuto come il meno tossico tra quelli comunemente utilizzati.*
- *controllo delle fasi di purificazione e di sterilizzazione per garantire un livello di sicurezza della sterilità $\leq 10^6$ (conforme all'EN 556-A1) ed una biocompatibilità che risponde alle esigenze della norma internazionale ISO 10993-1 (non irritante, non sensibilizzante, non citotossico, assenza di tossicità sistemica, non genotossico, assenza di reazioni del tessuto al contatto o a distanza del prodotto a base di acido ialuronico)*
- *esperienza e capacità del gruppo CORNEAL® nella produzione delle soluzioni a base di acido ialuronico.*





LA TECNOLOGIA HAUTE VISCOSITE

La gamma Haute Viscosité completa la linea Juvederm classica per la correzione delle rughe offrendo i seguenti vantaggi :

Confort e precisione di impianto :

Tutti i prodotti della linea Juvederm sono monofasici, quindi senza residui.

Al fine di eliminare le irregolarità di iniezione che possono avvenire in un impianto classico LEADerm utilizza, per la fabbricazione dei prodotti della gamma Juvederm® Haute Viscosité, il procedimento brevettato WO 02/06350, messo a punto dall'equipe di Ricerca e Sviluppo dei LaboratoriCORNEAL®.

Questa tecnica permette di iniettare Juvederm® 24HV e Juvederm® 30HV con maggiore facilità anche con un ago più fine (30G_{1/2}). L'uso di aghi fini permette una maggiore precisione di impianto nel trattamento delle irregolarità cutanee ed il contorno delle labbra; osservando un risultato uniforme grazie alla omogeneità degli impianti della gamma Juvederm Haute Viscosité

Durata :

Essendo la degradazione dell'acido ialuronico in situ, molto rapida, conviene aumentare il suo tempo di permanenza nei tessuti. Questo è ottenuto grazie alla scelta di un acido ialuronico di massa molecolare alta e stabilizzando lo stesso con la reticolazione, azione che ha l'effetto di legare tra loro le singole molecole così da formarne una unica.

La gamma Juvederm® HV beneficia dello stesso processo di reticolazione della linea Juvederm classica.


Più il prodotto è reticolato, più la sua durata nei tessuti cutanei è lunga. Juvederm® 24HV ha un tasso di reticolante equivalente a quello di Juvederm® 30. Juvederm® 30HV è invece l'impianto più reticolato di tutta la linea.

La loro tenuta è stimata in media 12 mesi e, nelle labbra, 8 mesi data la forte vascolarizzazione delle stesse.


Ma, come per la linea classica, la tenuta nei tessuti degli impianti della gamma Juvederm Haute Viscosité varia in funzione dei tipi di pelle, dei punti e della tecnica di iniezione....

Inoltre, per ottimizzare l'effetto ricercato e la durata della correzione, è opportuno prevedere, già dal primo impianto, un ritocco a distanza di un mese.

Profilo di iniezione degli impianti della linea Juvederm® classica

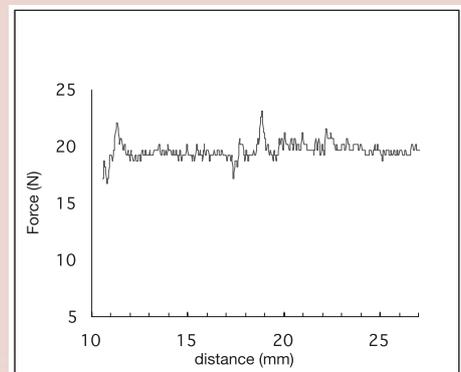

Il profilo di iniezione degli impianti della gamma Juvederm® Haute Viscosité è liscio e la forza di iniezione è inferiore

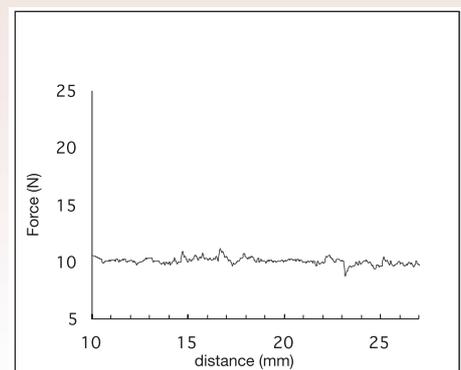



Juvéderm® HV

HAUTE VISCOSITÉ

INDICAZIONI :



• **JUVÉDERM® 24 HV,**
è destinato al riempimento delle rughe di media profondità.
Permette di riempire le rughe frontali marcate, le rughe della glabella, i solchi naso-genieni poco profondi, le pieghe delle guance e le commissure labiali superficiali. Juvéderm® 24HV permette anche di trattare il contorno delle labbra.
Questa versione si inietta nel derma medio/superficiale.



• **JUVÉDERM® 30 HV,**
è destinato al riempimento delle rughe profonde.
Permette di riempire efficacemente i solchi naso-genieni più marcati, ridona volume alle labbra, scolpisce gli zigomi, "volumizza" le guance e ristrutturava l'ovale del viso.
Questa versione si impianta nel derma mediolprofondo.

Aumento di volume delle guance e riempimento delle "pieghe di amarezza" con Juvéderm®30HV

Photos Dr Larrouy (Nice, FRANCE)



PRIMA



DOPO

RUGHE FRONTALI :
Juvéderm® 24 HV

GLABELLA :
Juvéderm® 24 HV

ZIGOMI :
Juvéderm® 30 HV

VOLUMIZZAZIONE
DELLE GUANCE :
Juvéderm® 30 HV

COMMISSURE LABIALI :
Juvéderm® 24 HV

PIEGHE DI ESPRESSIONE :
Juvéderm® 30 HV

SOLCHI NASO-GENIENI :
Juvéderm® 24 HV
Juvéderm® 30 HV


RUGHE DELLE GUANCE :
Juvéderm® 24 HV

RUGHE PERI-BUCCALI :
Juvéderm® 24 HV


CONTORNO DEL VISO :
Juvéderm® 30 HV

CONTORNO DELLE LABBRA :
Juvéderm® 24 HV

VOLUME DELLE LABBRA :
Juvéderm® 30 HV

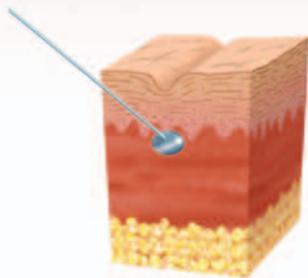

Impianto di Juvederm® 24 HV
nel derma medio/superficiale

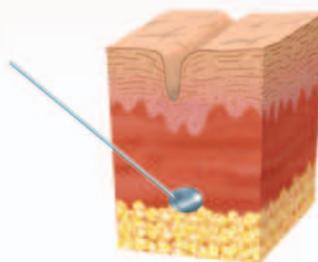

Impianto di Juvederm® 30 HV
nel derma medio/profondo

Juvéderm® HV

HAUTE VISCOSITÉ



	Juvéderm® 24 HV	Juvéderm® 30 HV
Componente attivo :	Acido ialuronico reticolato	Acido ialuronico reticolato
Origine :	Fermentazione batterica	Fermentazione batterica
Concentrazionz :	24 mg/g	24 mg/g
Reticolante :	BDDE (+++)	BDDE (++++)
Volume :	0.8 ml	0.8 ml
Sterilizzazione :	Autoclave	Autoclave
Diametro degli aghi :	30 G1/2	30 G1/2 ou 27 G1/2
Punti di impianto:	Rughe frontali marcate, rughe peri-buccali marcate, contorno delle labbra, rughe delle guance, solchi naso-genieni, commissure labiali	Solchi naso-genieni marcati, pieghe di espressione, volume delle labbra, volumizzazione delle guance, contorno del viso, zigomi
Livello di iniezione :	Derma medio/superficiale	Derma medio/profondo
Tecnica d'iniezione :	Lineare retrograda	Lineare retrograda
Conservazione :	fra 2°C et 25°C	fra 2°C et 25°C

Prima Dopo

Solchi naso-genieni, rughe delle guance e pieghe di espressione con Juvéderm® 30 Haute Viscosité.

Photos Dr Bergeret-Galley (Paris, FRANCE)



Volume del labbro superiore con Juvéderm® 30 Haute Viscosité.

Photos Dr Bergeret-Galley (Paris, FRANCE)



- Il trattamento sarà previsto nello stesso modo sia con gli impianti della linea classica, sia con la gamma Haute Viscosité

Potrà essere completato con impianti di Juvelift CORNEAL® (mesolifting) per migliorare l'idratazione e la tonicità della pelle.

- E' raccomandata la tecnica di iniezione lineare retrograda

Per evitare rischi di ematomi, è consigliato massaggiare il punto o i punti di iniezione con una crema a base di vitamina K, prima e dopo la seduta di impianto. Può essere in egual modo prescritto un trattamento omeopatico a base di APIS o di ARNICA, o, ancora un trattamento allopatico (tipo DYCINO-NE 500)

E' decisamente sconsigliato ai pazienti assumere vitamina C a forte dosaggio, aspirina, anti-infiammatori p anti-coagulanti, una settimana prima della seduta di impianto.

*Per partecipare a corsi di formazione,
non esitate a contattare il vostro referente commerciale*

- **Anestesia :**

Come per la linea Juvederm® classica, potete proporre ai vostri pazienti una anestesia locale per rendere più confortevole la correzione, per esempio applicando una crema anestetica o tramite anestesia locale tronculare per le labbra.

CONTRO INDICAZIONI :

- Donne in gravidanza o in allattamento
- Zone che presentano problemi cutanei di tipo infiammatorio e/o infezioni (acne, herpes,...).
- In associazione a trattamenti laser, peeling chimico o una dermoabrasione...

Non dimenticate di chiedere ai vostri pazienti i loro antecedenti patologici quali: tendenza a sviluppare cicatrici ipertrofiche, malattie auto immuni, trattamenti immuno-terapeutici o ipersensibilità conosciuta all'acido ialuronico.

(Per maggiori informazioni leggere attentamente le istruzioni per l'uso).

EFFETTI INDESIDERATI :

Dopo l'impianto potrebbero apparire reazioni infiammatorie (rossore, edemi, eritemi..) associate a prurito o a dolori al tatto. Queste reazioni potrebbero perdurare fino ad una settimana dall'impianto.

Indurimenti o noduli potrebbero apparire nel punto di impianto.

Sono stati ravvisati alcuni, rari, casi di colorazione della zona di iniezione (reversibili) Sono inoltre stati segnalati in letteratura dei rarissimi casi di necrosi nella regione glabellare, ascessi, granulomi ed ipersensibilità dopo l'impianto di acido ialuronico.

Il persistere di tali reazioni oltre una settimana o l'insorgere di altro effetto secondario, devono essere segnalati.

(Per maggiori informazioni leggere attentamente le istruzioni per l'uso).






Gruppo CORNEAL®,
unità di produzione,
Pringy (74), France.

Certifié ISO 9001 : 2000 - 13485 : 1996, 2001

FABBRICANTE :

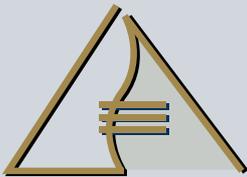

LEA Derm

LABORATOIRE D'ESTHETIQUE APPLIQUÉE
EN DERMATOLOGIE

Groupe CORNEAL®

Distribuito da



G.F. ELECTROMEDICS srl

Via R. Giuliani, 505 - Firenze
Tel. 0554250396 - Fax 055456241
<http://www.gfelectromedics.it>
E-mail: gfpacetti@gfelectromedics.it

CE
0459